

# Tischautoklav HMT 300MB




# HMC EUROPE



1. **Innovativ und vielseitig** mit kompaktem, elegantem Design, hoher Zuverlässigkeit und Sicherheit, intelligente Programmeinstellungen mit Vor- bzw. Trockenvakuum.
2. **10 -Installierte Programme**
  - max. 6 Sterilisierprogramme
  - 1 frei wählbares Programm
  - 3 Testprogramme
  - Trockenprogramm**optional** zusätzliches Liquidprogramm
3. **Vor-Vakuum:** Für ein sicheres Sterilisations-Ergebnis.
4. **Trocknungs-Vakuum:** für ein perfekt getrocknetes Ergebnis.
5. **Mikroprozessor-Kontrolle-System:** Völlig automatische Kontrolle von Vorvakuum bis hin zum Trocknungsvakuum, 10 Programme für Ihre professionelle Auswahl.
6. **Automatische Wassereinspeisung(aus Tank):** in die Kammer nach der Vorvakuumphase.
7. **Doppelte Wassermangelsicherung:** Eine für den Wasser-Tank, eine für das Kammer-Wasser. Bei Unterschreiten des benötigten Wasserstandes leuchtet die „LOW-WATER“-Anzeige auf und ein akustisches Signal ertönt.
8. **Türverriegelung:** Druckkontrolle, außerdem kann, wenn die Tür nicht komplett geschlossen ist, keine Funktion ausgeführt werden.
9. **Zykluskontrolle:** Autocheck jeder einzelnen Arbeitsphase. Nach korrekter Beendigung des jeweiligen Zyklus leuchtet die „COMPLETE“-Anzeige.
10. **Vorheizung:** Mit Hilfe der eingebauten Heizung wird nicht nur die Kammer temperiert, sie wird auch zur Trocknung eingesetzt.
11. **Temperatur Kontrolle:** Temperaturkontrolle während der Sterilisation und Überhitzungsschutz
12. **Kammerdruck Überwachung:** über Sicherheitsventil und Druckschalter
13. **Not-Aus Schalter:** Drücken Sie den „EMERGENCY“-Schalter - es wird sofort die Stromzufuhr unterbrochen und die Kammer entlüftet.
14. **Flüssigkeitsprogramm:**  
Dies ist eine besondere Funktion für den Laborbedarf (siehe auch Punkt 2)
15. **Besonderes PRIONEN Programm**
16. **BOWIE-DICK Test:** Die Benutzer können die korrekte Sterilisation mit dieser Einrichtung überwachen
17. **Fehler-Anzeige:** zur schnellen Fehlersuche für Service- und Bedienpersonal.
18. **Optionales Zubehör:** z.B Korb, Sterilisierbox, Stapelsystem oder Spiralhalter



<b>Technische Daten</b>		<b>HMT 300 MB</b>
Kammervolumen	Liter	40
Kammermaße Ø x H	mm	300 x 570
Max. Sterilgutlänge	mm	470
Max. Sterilgut unverpackt, Feststoff	kg	8,2
Max. Sterilgut verpackt	kg	2,4
Außenmaße B x T x H	mm	620 x 766 x 489
Arbeitstemperatur	°C	105-135°
Vakuum		ja
Dokumentation		Ja, Einbaudrucker, SD-Karten Recorder
Wassertank	Liter	4,2
Heizleistung	kW	2,3
Gewicht	kg	87
Kennzeichnung		CE
Spannungsversorgung	V	AC 220 V/240 V
Sicherheitsvorrichtungen		Übertemperaturschutz, Sicherheitsventil, Überdruckschalter, Verschluss, Wasserstands Überwachung für Vorratsbehälter und Sterilisierkammer
<b>Programme</b>		
6 Sterilisierprogramme		Unverpackt 121°C; Unverpackt 134°C Verpackt 121°C; Verpackt 134°C Prionen-Programm Frei einstellbar 105-135°C
3 Testprogramme		Dichtigkeitstest Helix-test Bowie-Dick Test
Trockenprogramm	min	1-60
Andere Funktionen		Not-Aus Dokumentation des Sterilisationsprozesses Automatische Wassereinspeisung Echtzeitdrucker Zykluszähler Wartungszyklus aufforderung Kalibrier-/Servicemodus
Drucker		Thermopapierdrucker
SD-Karten Speicher		SD/HC max. 32GB
<b>Artikelnummer</b>		<b>22021</b>

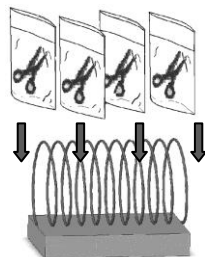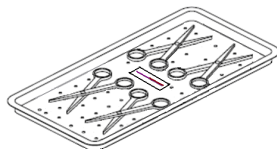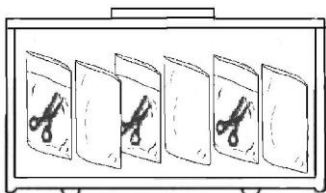

Kellerstr. 1  
D-84577 Tüßling  
Tel.: ++49(0)8633/50 520-0  
Fax: ++49(0)8633/50 520-99  
[info@hmc-europe.com](mailto:info@hmc-europe.com)  
[www.hmc-europe.com](http://www.hmc-europe.com)